


**SEMPERMED SUPREME**  
QUALITA' SU TUTTA LA LINEA



**sempermed®**  **supreme**

SEMPERMED SUPREME

# QUALITA' SU TUTTA LA LINEA

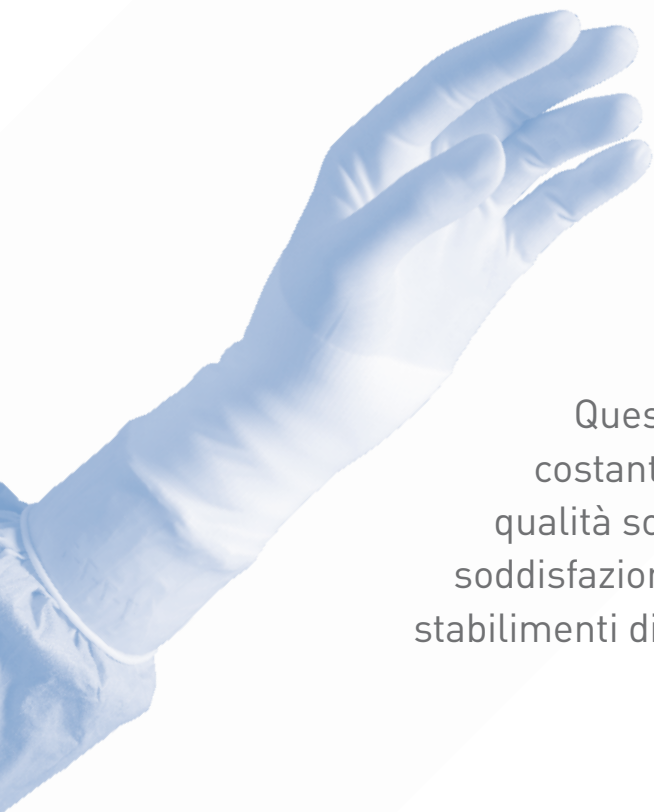


Sempermed Supreme significa qualità e affidabilità, infatti si tratta di uno dei guanti chirurgici senza polvere più venduti in Europa.

Questo dato di fatto rende necessaria una costante ottimizzazione del prodotto e della qualità sotto tutti gli aspetti, per la massima soddisfazione dei clienti da oltre 90 anni dagli stabilimenti di produzione in Austria.

## FACILI DA INDOSSARE

L'attrito dipende dalla resistenza incontrata

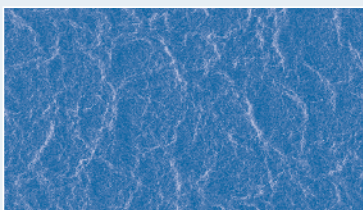

## Un segreto ben custodito

Il rivestimento interno, sintetico, che facilita la calzatura di Sempermed Supreme, è il risultato di anni di lavoro. La struttura del rivestimento è brevettata.

## Il sistema di rivestimento

E' facile spiegare perché i Sempermed Supreme sono così facili da indossare. Lo strato interno non ha una superficie liscia, ma una struttura speciale a forma di rete. In questo modo la superficie del film a contatto con la pelle viene ottimizzata, riducendo notevolmente la resistenza all'attrito quando si indossa il guanto. La struttura offre una piacevole sensazione vellutata sulla pelle.

## Il cambio dei guanti intraoperatorio

In base agli studi effettuati, il 24-37% dei guanti chirurgici dopo l'uso evidenzia perforazioni (World J. Surg., 1999). Tuttavia, in caso di interventi di durata maggiore, anche il sudore che si forma fra la superficie cutanea e il guanti causa un rigonfiamento della pellicola protettiva del guanto. Per questo motivo, Sempermed raccomanda di sostituire regolarmente i guanti durante gli interventi. Lo speciale rivestimento interno di Sempermed Supreme semplifica la calzatura in ambiente "umido".

## VESTIBILITÀ DEI GUANTI SOVRAPPOSTI



In caso di sollecitazioni estreme o con pazienti a rischio, indossare due paia di guanti sovrapposti offre una sicurezza massima. Sempermed Supreme consente di indossare due paia di guanti, uno sull'altro, senza problemi, conservando una sensibilità al tatto molto buona.

## SENSIBILITÀ AL TATTO IDEALE

Sensibilità per prestazioni massime



### Sicurezza ottimale

Il vostro lavoro richiede la massima sensibilità, movimenti di precisione e sensibilità al tatto ottimale. Il fattore decisivo per ottenere la massima sicurezza, conservando un'eccellente sensibilità, è lo spessore

### Come una seconda pelle

Grazie alla sua resistenza, lo spessore di Sempermed Supreme è talmente ridotto da non limitare neppure un po' la sensibilità al tatto, garantendo tuttavia la massima sicurezza. E' come una seconda pelle, quasi impercettibile. E cosa veramente importante, consente di indossare due paia di guanti sovrapposti senza problemi

## MASSIMO CONFORT

Veste perfettamente



### Le vostre mani sono la misura di ogni cosa

Ogni mano è unica. Come la forma di Sempermed Supreme. Sviluppata espressamente per le esigenze della sala operatoria, la forma completamente anatomica, con le dita piegate, corrisponde alla natura posizione rilassata della mano.

### Parte terminale sicura

Il polsino conico è stato adattato all'anatomia dell'articolazione della mano e il bordino arrotolato consente una chiusura sicura sopra al camice.

### Lavorare senza affaticarsi

La posizione rilassata delle mani è stata studiata per garantire un lavoro senza fatica, indossando Sempermed Supreme, l'uso degli strumenti, anche negli interventi più lunghi, sarà fermo e sicuro. A ciò contribuisce anche il dorso extra largo del guanto.

## PER IL BENESSERE DELLA PELLE



### Il trattamento Semperit per il benessere della pelle.

Sempermed ha sviluppato una particolare procedura di trattamento automatico, durante la quale i guanti vengono lavati diverse volte in modo intensivo. Ciò consente di ridurre al minimo, per quanto tecnicamente possibile, la presenza di sostanze irritanti per la pelle e il contenuto di proteine del lattice naturale.

# DATI TECNICI



## sempermed® supreme

<b>TYP</b>	guanto chirurgico sterile monouso, senza polvere, rivestimento interno sintetico			
<b>MATERIALE</b>	lattice naturale (NR)			
<b>COLORE</b>	bianco naturale			
<b>FORMA DEL GUANTO</b>	completamente anatomica con cordolo			
<b>TAGLIA / LUNGHEZZA</b> in base a EN 455-2	5 ½, 6 e 6 ½	min. 270 mm		
	7, 7 ½ e 8	min. 280 mm		
	8 ½ e 9	min. 285 mm		
<b>SPESSORE</b> strato singolo nella zona del palmo	0,19 - 0,24 mm			
<b>DENSITÀ</b> conforme a EN 455-1	AQL 1,0			
<b>RESISTENZA ALLA ROTTURA</b> conforme a EN 455-2	≥12 N			
<b>CONSERVABILITÀ</b> nella confezione originale con stoccaggio conforme a DIN 7716, ISO 2230	3 anni			
<b>NUMERO ARTICOLO</b>	misura 5,5	822751521	misura 7,5	822751721
	misura 6,0	822751601	misura 8,0	822751801
	misura 6,5	822751621	misura 8,5	822751821
	misura 7,0	822751701	misura 9,0	822751901
<b>STERILIZZAZIONE</b>	con raggi gamma min. 2,5 Mrad (25 kGy)			
<b>CONFEZIONAMENTO</b>	guanto sinistro e destro rovesciati, in tasca interna senza fibre, impenetrabile all'ozono, sigillati in buste medicali piatte			
	in dispenser con indicatore della sterilizzazione: 50 paia			
	in cartone pronto per la spedizione con indicatore della sterilizzazione: 300 paia			
<b>IDENTIFICAZIONE</b>	EN 1041, EN 980, ISO 15223			

### CI CONTATTI!

Semperit Technische Produkte GmbH - Division Sempermed  
 A-1031 Vienna · Modecenterstraße 22 · Tel.: +43 1 79 777-0 · Fax: +43 1 79 777-630  
 sempermed@semperit.at · www.sempermed.com