

Designed around your hands.

# LEIKKAUSKÄSINEET



Sempermed Supreme – Parantaville käsille  
Sempermed Senso – Erittäin herkille alueille

Sempermed Syntegra IR – Turvallinen ratkaisu luonnonkumiallergiasta kärsiville  
Sempermed Supreme – Parantaville käsille

Sempermed Syntegra IR – Turvallinen ratkaisu luonnonkumiallergiasta kärsiville  
Sempermed Senso – Erittäin herkille alueille

# SINUN KÄTESI ASIAANTUNTEVISSA KÄSISSÄ



Yli 90 vuotta eurooppalaista tuotekehitystä ja tuotantoa takaavat Sempermed-leikkauskäsineiden turvallisuuden ja erinomaisen soveltuvuuden ammattikäyttöön.

Sempermed-leikkauskäsineissä korostuvat ennen kaikkea täydellinen pito, erinomainen tuntoherkkyys ja korkea käyttömukavuus.

Laaja tuotevalikoima sisältää perinteisten leikkauskäsineiden lisäksi erityisiä tuote- ja materiaaliominaisuuksia omaavia erikoiskäsineitä ja tarjoaa oikeat ratkaisut erilaisiin tarkoituksiin.

Eurooppalaisen valmistajan asiantuntemus ja lähellä käyttäjää oleva palvelu takaavat sen, että Sempermed on erinomainen ratkaisu kaikkiin leikkauskäsinetarpeisiisi.

## ENSILUOKKAISTA TURVALLISUUTTA

Sormituntumalla huippusuorituksiin



Leikkaustiimin työ vaatii tarkkaa motoriikkaa ja optimaalista tuntoherkkyyttä. Tärkein turvallisuuteen ja tuntoherkyyteen vaikuttava tekijä on käsineen vahvuus.

Kaikkien luonnonkumista valmistettujen Sempermed-leikkauskäsineiden luonnonkumikalvo on erittäin lujaa ja sen vuoksi käsineen vahvuus on voitu laskea tasolle, joka ei rajoita sormien tuntoherkkyyttä mutta silti takaa ensiluokkaisen turvallisuuden.

## VÄSYMÄTÖNTÄ JA TURVAL- LISTA TYÖSKENTELYÄ

Korkea käyttömukavuus



Käsineiden tuotekehittelytyön lähtökohtina ovat aina olleet erilaisten kirurgisten toimenpiteiden asettamat vaatimukset, kuten esimerkiksi täysanatominen muotoilu ja työskentelymukavuuteen liittyvät yksityiskohdat.

Käsineen muoto vastaa käden levollista toiminta-asentoa, jossa sormet kaartuvat luonnollisesti. Työskentely sujuu vaivattomasti.

Sempermed-käsineiden erikoispiirre on myös väsymystä ehkäisevä, erityislevä kämmenselkä sekä ranteen anatomiaa vastaava kartiomainen ranneke, joka rullareunuksineen muodostaa saumattoman kokonaisuuden leikkausta-kin kanssa

## VAIVATON INSTRUMENT- TIEN KÄSITTELY


Varma ote ja turvallinen tunne



Täydellinen leikkauskäsine ei saa missään tapauksessa olla liukas. Instrumentit eivät myöskään saa tarttua käsineeseen. Paras ratkaisu saavutetaan käyttämällä pinnaltaan mikrokarhennettuja posliinisia muotteja. Niillä luodaan Sempermed-käsineiden erinomaisen hyvä pito.

## PATENTOITUA TEKNOLOGIAA

- Helppo pukea

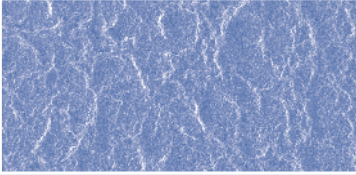

**Sisäpinnan verkkomainen rakenne**  
vähemmän kitkaa => helppo pukea

Puuterittomien leikkauskäsineiden patentoitu, synteettinen sisäpinta ei ole sileä vaan se on rakenteeltaan verkkomainen. Tämä vähentää pukemisen yhteydessä muodostuvaa kitkavastusta huomattavasti. Käsine ei tartu ihoon, tämä tuo lisämukavuutta.

## KÄSINEEN VAIHTO LEIKKAUKSEN AIKANA



Tutkimusten mukaan 10–45 %:ssa leikkauskäsineistä (käyttötarkoituksesta riippuen) on reikiä käytön jälkeen ja noin puoleen tulee reikiä jo ensimmäisen 30 minuutin aikana. (Lähde: The risk of surgical glove perforations, PubMed Norway, maaliskuu 2007). Jos toimenpide kestää pitkään, iholta erittyy myös hikeä käsineen ja ihon väliin. Siksi Sempermed suosittelee käsineiden vaihtoa säännöllisin väliajoin toimenpiteen aikana. Sempermed-leikkauskäsineiden erityinen sisäpinnoite helpottaa huomattavasti käsineen pukemista.

## KAKSOISKÄSINEET - KAKSINKERTAINEN SUOJA



Eriyisen vaativissa tilanteissa tai riskipotilaita käsiteltäessä kaksoiskäsineet suojaavat parhaiten. Kahden päällekkäisen Sempermed-leikkauskäsineen pukeminen on vaivatonta.

Suositus: Sisemmän käsineen tulisi olla puoli kokoa suurempi kuin käyttäjän normaalikoko

## EI ÄRSYÄ IHOA

Ihosi voi hyvin



Sempermed käyttää käsineiden viimeistelyssä kehittämänsä automaattista Semperit-järjestelmää, jossa käsineet pestään useaan kertaan. Näin tuotantoprosessista peräisin olevat ihoa ärsyttävät aineet ja luonnonkumiproteiinien määrä minimoidaan mahdollisimman pieneksi.

Laajassa puuterittomien leikkauskäsineiden valikoimassa on otettu huomioon sekä lääketieteelliset, inhimilliset että terveystaloudelliset näkökohdat ja siitä löytyy juuri oikeat käsineet kaikkiin tarpeisiin.

## VASTUU TULEVISTA SUKUPOLVISTA



Sempermed ajattelee leikkauskäsineiden valmistuksessa sekä turvallisuutta että seuraavien sukupolvien hyvinvointia.

Ympäristöystävällisten huipputekniikoiden ja koneiden käyttö tuotannossa, aggressiivisten kemikaalien käytön vähentäminen jälkikäsittelyssä, innovatiivisten menetelmien suosiminen sekä jatkuva tuotantoprosessien optimointi ympäristöä säästäviksi ovat Semperitille itsestäänselvyyksiä.

## LAATUA EUROOPAN SYDÄMESTÄ



Sempermedille tärkeitä ovat tutkimuksen ja kehityksen ohella laatu ja turvallisuus. Tuotteiden tasaisen korkea laatu sekä jatkuva pyrkimys täydellisyyteen takaavat sen, että olemme pystyneet alittamaan lakisääteisen AQL-luvun (Acceptable Quality Level), joka on yksi tärkeimmistä tuotannon laatuvaatimuksista.

Tuotantolaitosten keskeinen sijainti Euroopassa, laatutarkastuksille asetettavat erittäin korkeat vaatimukset sekä huipputasoinen tutkimus- ja kehitystyö ovat Sempermedin panokset sinun turvallisuuteesi

**UUDEN SUKUPOLVEN KÄSINE** – innovaatio leikkaussaliin: synteettisellä polyisopreenilla (IR) on samat fyysiset ominaisuudet kuin luonnonkumilla: maksimielastisuus ja mekaaninen lujuus. Luonnonkumiallergian ennaltaehkäisy.



#### HIGHLIGHTS

- Synteettinen polyisopreenimateriaali on hyödyllinen niin kirurgille, muille leikkaustöihin jäsensille kuin potilaallekin
- Puuteriton, ei sisällä luonnonkumia eikä allergisoivia proteiineja
- Turvallinen
- Mikrokarhennettu pinta antaa täydellisen pidon, myös märkänä
- Tuntoherkkyys luonnonkumikäsiin luokkaa
- Täysanatominen muoto, mukava erikoislevää kämmenselkää ja kaartuvat sormet

#### TUOTENRO

<b>Koko 5,5</b>	827056521	<b>Koko 7,5</b>	827056721
<b>Koko 6,0</b>	827056601	<b>Koko 8,0</b>	827056801
<b>Koko 6,5</b>	827056621	<b>Koko 8,5</b>	827056821
<b>Koko 7,0</b>	827056701	<b>Koko 9,0</b>	827056901

#### TUOTETIEDOT

<b>TYYPPI</b>	steriili, puuteriton leikkauskäsine, jossa synteettinen sisäpinnoite	
<b>MATERIAALI</b>	synteettinen polyisopreeni	
<b>VÄRI</b>	kermanvalkoinen	
<b>KÄSINEEN MUOTO</b>	täysanatominen muotoilu, varressa rullareuna	
<b>PITUUS/KOKO</b> EN 455-2 standardin mukaisesti	5½, 6 ja 6½ 7, 7½ ja 8 8½ ja 9	väh. 270 mm väh. 280 mm väh. 285 mm
<b>PAKSUUS</b> mitattuna kämmenen alueella yksinkertaisena	0,19 - 0,24 mm	
<b>LÄPÄISEMÄTTÖMYYS</b> EN 455-1 standardin mukaisesti	AQL 1,0	
<b>MEKAANINEN LUJUUS</b> EN 455-2 standardin mukaisesti	≥ 9 N	
<b>KÄYTTÖKELPOISUUSAIKA</b> alkuperäispakkauksessa, jos säilytys DIN 7716:n mukaisesti, ISO 2230:mukaisesti	3 vuotta	
<b>STERILOINTI</b>	gammasterilointi vähintään 25 kGy	
<b>PAKKAUS</b>	vasen ja oikea käsine käännettyinä kuiduttomassa sisätaskussa, otsonitiiviiseen yksikköpakkaukseen pakattuna. sterilointi-indikaattorilla varustetussa osastorasiasa 40 paria sterilointi-indikaattorilla varustetussa kuljetuskartongissa 240 paria	

**LISÄTURVAA** – ihanteellinen aluskäsine. Vihreä väri helpottaa päällyskäsineen repeytymisen havaitsemista leikkauksen aikana. Yhdistelmä Sempermed Syntegra Green/ Syntegra IR on paras, ihoystävällisin ja mukavin käsineratkaisu.



#### HIGHLIGHTS

- Synteettinen polyisopreeni säästää kirurgia, muuta leikkaustöitä ja potilasta
- Puuteriton, ei sisällä luonnonkumia, ei sisällä allergisoivia proteiineja
- Optimiturvaa
- Luonnonkumin tuntoherkkyys
- Anatomian kannalta täydellinen muotoilu, mukava erikoislevää kämmenselkää ja kaartuvat sormet
- Kriittisissä tilanteissa Sempermed suosittelee kaksoispukemista

#### TUOTENRO

<b>Koko 5,5</b>	827053521	<b>Koko 7,5</b>	827053721
<b>Koko 6,0</b>	827053601	<b>Koko 8,0</b>	827053801
<b>Koko 6,5</b>	827053621	<b>Koko 8,5</b>	827053821
<b>Koko 7,0</b>	827053701	<b>Koko 9,0</b>	827053901

#### TUOTETIEDOT

<b>TYYPPI</b>	steriili leikkauskäsine, puuteriton, synteettinen sisäpinnoite	
<b>MATERIAALI</b>	synteettinen polyisopreeni	
<b>VÄRI</b>	vihreä	
<b>KÄSINEEN MUOTO</b>	täysin anatomisesti muotoiltu, varressa rullareuna	
<b>PITUUS/KOKO</b> EN 455-2 standardin mukaisesti	5½ 6, 6½ ja 7 7½, 8, 8½ ja 9	väh. 275 mm väh. 280 mm väh. 290 mm
<b>PAKSUUS</b> mitattuna kämmenen alueella yksinkertaisena	väh. 0,15 mm	
<b>LÄPÄISEMÄTTÖMYYS</b> EN 455-1 standardin mukaisesti	AQL 1,0	
<b>MEKAANINEN LUJUUS</b> EN 455-2 standardin mukaisesti	≥ 9 N	
<b>KÄYTTÖKELPOISUUSAIKA</b> alkuperäispakkauksessa, jos säilytys DIN 7716:n mukaisesti, ISO 2230:mukaisesti	3 vuotta	
<b>STERILOINTI</b>	gammasterilointi vähintään 25 kGy	
<b>PAKKAUS</b>	vasen ja oikea käsine käännettyinä kuiduttomassa sisätaskussa, otsonitiiviiseen yksikköpakkaukseen pakattuna. sterilointi-indikaattorilla varustetussa osastorasiasa 40 paria sterilointi-indikaattorilla varustetussa kuljetuskartongissa 240 paria	



**LAATUA JATKUVASTI** – Sempermed Supreme tarkoittaa laatua ja luotettavuutta; se on Euroopan käytetyimpiä puuterittomia leikkauskäsineitä.

#### HIGHLIGHTS

- Patentoitu synteettinen sisäpinnoite helpottaa pukemista
- Pesty moneen kertaan, ehdottomasti puuteriton
- Useimpien käyttäjien iho sietää Supremea hyvin
- Anatomian kannalta täydellinen muotoilu, mukava erikoislevää kämmenselkää ja kaartuvat sormet

#### TUOTENRO

<b>Koko 5,5</b>	822751521	<b>Koko 7,5</b>	822751721
<b>Koko 6,0</b>	822751601	<b>Koko 8,0</b>	822751801
<b>Koko 6,5</b>	822751621	<b>Koko 8,5</b>	822751821
<b>Koko 7,0</b>	822751701	<b>Koko 9,0</b>	822751901

#### TUOTETIEDOT

<b>TYYPPI</b>	steriili, puuteriton leikkauskäsine, jossa synteettinen sisäpinnoite		
<b>MATERIAALI</b>	luonnonkumi		
<b>VÄRI</b>	luonnonvalkoinen		
<b>KÄSINEEN MUOTO</b>	täysanatominen muotoilu, varressa rullareuna		
<b>PITUUS/KOKO</b> EN 455-2 standardin mukaisesti	5½, 6 ja 6½ 7, 7½ ja 8 8½ ja 9	väh. 270 mm väh. 280 mm väh. 285 mm	
<b>PAKSUUS</b> mitattuna kämmenen alueella yksinkertaisena	0,19 - 0,24 mm		
<b>LÄPÄISEMÄTTÖMYYS</b> EN 455-1 standardin mukaisesti	AQL 1,0		
<b>MEKAANINEN LUJUUS</b> EN 455-2 standardin mukaisesti	≥ 12 N		
<b>KÄYTTÖKELPOISUUSAIKA</b> alkuperäispakkauksessa, jos säilytys DIN 7716:n mukaisesti, ISO 2230:mukaisesti	3 vuotta		
<b>STERILOINTI</b>	gammasterilointi vähintään 25 kGy		
<b>PAKKAUS</b>	vasen ja oikea käsine käännettyinä kuiduttomassa sisätaskussa, otsonitiiviiseen yksikköpakkaukseen pakattuna sterilointi-indikaattorilla varustetussa osastorasiasassa 50 paria sterilointi-indikaattorilla varustetussa kuljetuskartongissa 300 paria		



**VARMA OTE** – Varma ote ja maksimiturvallisuus kaikissa tilanteissa, hyvä tuntoherkkyys, täydellistä instrumenttien käsittelyä.

#### HIGHLIGHTS

- Paras pito koko Sempermed sortimentissa
- Patentoitu synteettinen sisäpinnoite helpottaa pukemista ja riisumista
- Moneen kertaan pesty, täysin puuteriton
- Anatomian kannalta täydellinen muotoilu, mukava erikoislevää kämmenselkää ja kaartuvat sormet

#### TUOTENRO

<b>Koko 5,5</b>	822851521	<b>Koko 7,5</b>	822851721
<b>Koko 6,0</b>	822851601	<b>Koko 8,0</b>	822851801
<b>Koko 6,5</b>	822851621	<b>Koko 8,5</b>	822851821
<b>Koko 7,0</b>	822851701	<b>Koko 9,0</b>	822851901

#### TUOTETIEDOT

<b>TYYPPI</b>	steriili leikkauskäsine, puuteriton, synteettinen sisäpinnoite		
<b>MATERIAALI</b>	luonnonkumi		
<b>VÄRI</b>	luonnonvalkoinen		
<b>KÄSINEEN MUOTO</b>	täysanatominen muotoilu, varressa rullareuna		
<b>PITUUS/KOKO</b> EN 455-2 standardin mukaisesti	5½, 6 ja 6½ 7 ja 7½ 8, 8½ ja 9	väh. 270 mm väh. 280 mm väh. 285 mm	
<b>PAKSUUS</b> mitattuna kämmenen alueella yksinkertaisena	0,19 - 0,24 mm		
<b>LÄPÄISEMÄTTÖMYYS</b> EN 455-1 standardin mukaisesti	AQL 1,0		
<b>MEKAANINEN LUJUUS</b> EN 455-2 standardin mukaisesti	≥ 12 N		
<b>KÄYTTÖKELPOISUUSAIKA</b> alkuperäispakkauksessa, jos säilytys DIN 7716:n mukaisesti, ISO 2230:mukaisesti	3 vuotta		
<b>STERILOINTI</b>	gammasterilointi vähintään 25 kGy		
<b>PAKKAUS</b>	vasen ja oikea käsine käännettyinä kuiduttomassa sisätaskussa, otsonitiiviiseen yksikköpakkaukseen pakattuna sterilointi-indikaattorilla varustetussa osastorasiasassa 50 paria sterilointi-indikaattorilla varustetussa kuljetuskartongissa 300 paria		

**GREEN M** – ihanteellinen aluskäsine: Vihreä väri helpottaa päällyskäsineen repeytymisen havaitsemista leikkauksen aikana. Sempermed Green M / Supreme on turvallisin ja mukavin käsineyhdistelmä.



#### HIGHLIGHTS

- Kriittisissä tilanteissa Sempermed suosittelee kaksoispukemista
- Puuteriton luonnonkumikäsine
- Anatomian kannalta täydellinen muotoilu, mukava erikoislevä kämmenselkä ja kaartuvat sormet

#### TUOTENRO

<b>Koko 5,5</b>	823756521	<b>Koko 7,5</b>	823756721
<b>Koko 6,0</b>	823756601	<b>Koko 8,0</b>	823756801
<b>Koko 6,5</b>	823756621	<b>Koko 8,5</b>	823756821
<b>Koko 7,0</b>	823756701	<b>Koko 9,0</b>	823756901

#### TUOTETIEDOT

<b>TYYPPI</b>	steriili, puuteriton leikkauskäsine, jossa synteettinen sisäpinnoite		
<b>MATERIAALI</b>	luonnonkumi		
<b>VÄRI</b>	vihreä		
<b>KÄSINEEN MUOTO</b>	täysanatominen muotoilu, varressa rullareuna		
<b>PITUUS/KOKO</b> EN 455-2 standardin mukaisesti	5½ 6, 6½ ja 7 7½, 8, 8½ ja 9	min. 275 mm min. 280 mm min. 290 mm	
<b>PAKSUUS</b> mitattuna kämmenen alueella yksinkertaisena	väh. 0,2 mm		
<b>LÄPÄISEMÄTTÖMYYS</b> EN 455-1 standardin mukaisesti	AQL 1,0		
<b>MEKAANINEN LUJUUS</b> EN 455-2 standardin mukaisesti	≥ 12 N		
<b>KÄYTTÖKELPOISUUSAIKA</b> alkuperäispakkauksessa, jos säilytys DIN 7716:n mukaisesti, ISO 2230:mukaisesti	3 vuotta		
<b>STERILOINTI</b>	gammasterilointi vähintään 25 kGy		
<b>PAKKAUS</b>	vasen ja oikea käsine käännettyinä kuiduttomassa sisätaskussa, otsonitiiviiseen yksikköpakkaukseen pakattuna sterilointi-indikaattorilla varustetussa osastorasiassa 40 paria sterilointi-indikaattorilla varustetussa kuljetuskartongissa 240 paria		

**ERITYISEN TARKKOIHIN TOIMENPITEISIIN** – extraohut leikkauskäsine Sempermed Senso luo edellytykset tarkkaa motoriikkaa vaativille toimenpiteille. Siinä on erinomainen tuntoherkkyyks ja hyvä pito herkimmissäkin toimenpiteissä. Se on kehitetty erityisesti mikrokirurgiaan, erityisen hyvin se sopii neurokirurgisiin toimenpiteisiin, endoskopiaan sekä silmä- ja verisuonikirurgiaan.



#### HIGHLIGHTS

- Patentoitu synteettinen sisäpinnoite helpottaa pukemista
- Pesty moneen kertaan, ehdottomasti puuteriton
- Turvallinen – tasavahvuinen koko pinnaltaan
- Mikrokarhea pinta, varma pito vaikeissakin tilanteissa
- Anatomian kannalta täydellinen muotoilu, mukava erikoislevä kämmenselkä ja kaartuvat sormet

#### TUOTENRO

<b>Koko 5,5</b>	821751521	<b>Koko 7,5</b>	821751721
<b>Koko 6,0</b>	821751601	<b>Koko 8,0</b>	821751801
<b>Koko 6,5</b>	821751621	<b>Koko 8,5</b>	821751821
<b>Koko 7,0</b>	821751701	<b>Koko 9,0</b>	821751901

#### TUOTETIEDOT

<b>TYYPPI</b>	steriili, ohut puuteriton leikkauskäsine, jossa synteettinen sisäpinnoite		
<b>MATERIAALI</b>	luonnonkumi		
<b>VÄRI</b>	ruskea		
<b>KÄSINEEN MUOTO</b>	täysanatominen muotoilu, varressa rullareuna		
<b>PITUUS/KOKO</b> EN 455-2 standardin mukaisesti	5½ 6, 6½, 7, 7½, 8, 8½ ja 9	väh. 250 mm väh. 280 mm	
<b>PAKSUUS</b> mitattuna kämmenen alueella yksinkertaisena	0,14 - 0,18 mm		
<b>LÄPÄISEMÄTTÖMYYS</b> EN 455-1 standardin mukaisesti	AQL 1,0		
<b>MEKAANINEN LUJUUS</b> EN 455-2 standardin mukaisesti	≥ 12 N		
<b>KÄYTTÖKELPOISUUSAIKA</b> alkuperäispakkauksessa, jos säilytys DIN 7716:n mukaisesti, ISO 2230:mukaisesti	3 vuotta		
<b>STERILOINTI</b>	gammasterilointi vähintään 25 kGy		
<b>PAKKAUS</b>	vasen ja oikea käsine käännettyinä kuiduttomassa sisätaskussa, otsonitiiviiseen yksikköpakkaukseen pakattuna sterilointi-indikaattorilla varustetussa osastorasiassa 50 paria sterilointi-indikaattorilla varustetussa kuljetuskartongissa 300 paria		

# KERTAKÄYTTÖISET SEMPERMED LEIKKAUSKÄSINEET



	sempermed® syntegra IR latex free	sempermed® syntegra green latex free	sempermed® supreme
<b>TYYPPI</b>	steriili, puuteriton leikkauskäsine, jossa synteettinen sisäpinnoite	steriili, puuteriton leikkauskäsine, jossa synteettinen sisäpinnoite	steriili, puuteriton leikkauskäsine, jossa synteettinen sisäpinnoite
<b>MATERIAALI</b>	synteettinen polyisopreeni	synteettinen polyisopreeni	luonnonkumi
<b>VÄRI</b>	kermanvalkoinen	vihreä	luonnonvalkoinen
<b>PAKSUUS</b> mitattuna kämmenen alueella yksinkertaisena	0,19 - 0,24 mm	väh. 0,15mm	0,19 - 0,24 mm
<b>MEKAANINEN LUJUUS</b> EN 455-2 standardin mukaisesti	≥ 9 N	≥ 9 N	≥ 12 N



	sempermed® supreme+	sempermed® GREEN M	sempermed® senso
<b>TYYPPI</b>	steriili, puuteriton leikkauskäsine, jossa synteettinen sisäpinnoite	steriili, puuteriton leikkauskäsine, jossa synteettinen sisäpinnoite	ohut, steriili, puuteriton leikkauskäsine, jossa synteettinen sisäpinnoite
<b>MATERIAALI</b>	luonnonkumi	luonnonkumi	luonnonkumi
<b>VÄRI</b>	luonnonvalkoinen	vihreä	ruskea
<b>PAKSUUS</b> mitattuna kämmenen alueella yksinkertaisena	0,19 - 0,24 mm	väh. 0,2 mm	0,14 - 0,18 mm
<b>MEKAANINEN LUJUUS</b> EN 455-2 standardin mukaisesti	≥ 12 N	≥ 12 N	≥ 12 N

OneMed Oy  
PL 10 (Metsäläntie 20) · 00320 Helsinki  
asiakaspalvelu@onemed.com  
Puh. 046 714 6800 · Faksi 020 602 9400  
www.onemed.fi · ISO 9001 -sertifioitu organisaatio

Semperit Technische Produkte Gesellschaft m.b.H.  
Division Sempermed  
Austria · 1031 Vienna · Modecenterstraße 22  
Tel.: +43 1 79 777-0 · Fax: +43 1 79 777-630  
e-mail: sempermed@semperit.at · www.sempermed.com

